

Rollstuhlrampe S-90 / S-150

Montage- und Gebrauchsanleitung



CE

Einleitung

Diese Gebrauchsanleitung enthält eine detaillierte Beschreibung des der beiden Produkte S-90 und S-150 sowie wichtige Hinweise für deren korrekten Gebrauch. Bitte lesen Sie daher vor Gebrauch der Produkte diese Anleitung sorgfältig durch. Beachten Sie bitte alle Anweisungen und folgen Sie diesen jederzeit um einen sicheren und dauerhaften Einsatz des Produktes zu gewährleisten.

Zweckbestimmung

Es handelt sich um mobile und transportable Rampensysteme zum Befahren mit dem Rollstuhl. Sie ermöglichen die Überwindung von Höhenunterschieden mit oder ohne Fremdhilfe (z.B. Treppenstufen). Sie können im Aussen- und Innenbereich eingesetzt werden.


Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das Produkt nur in einwandfreiem technischen Zustand.
- Falls Sie Beschädigungen oder Fehler am Produkt feststellen, wenden Sie sich umgehend die Stamm Bau AG.
- Die Rampen dürfen maximal mit insgesamt 300 kg belastet werden.
- Beachten Sie die Angaben auf dem Produkt-Aufkleber.
- Nutzen Sie die Rampen nur für den vorgesehenen Einsatzbereich (siehe Zweckbestimmung).
- Verwenden Sie die Rampen nur auf einer stabilen Bodenfläche.
- Rampen dürfen maximal zur Überbrückung folgender Höhenunterschiede verwendet werden: S-90: 20 cm | S-150 : 30 cm.
- Beim Auseinander- oder Zusammenklappen der Rampen ist darauf zu achten, dass keine Finger oder andere Körperteile eingequetscht werden.

Lieferumfang und Bezeichnung

Die Rampen werden in einem Karton mit folgendem Inhalt geliefert:

- 1 Rampe
- 1 Montage- und Gebrauchsanleitung

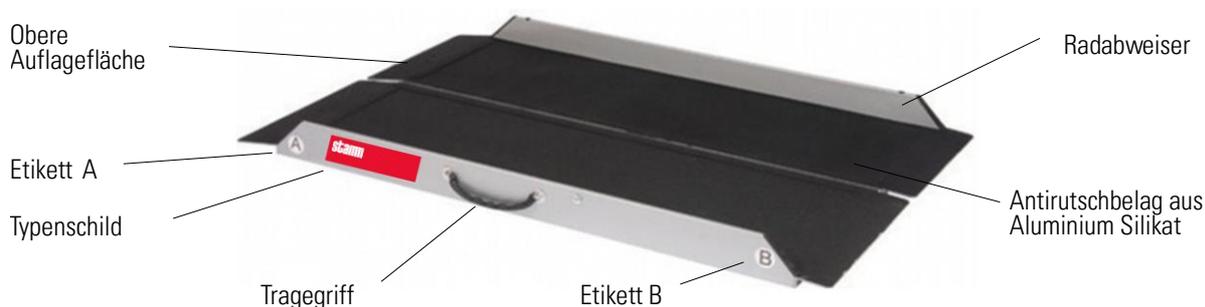

Anleitung

- Die Rampen sind mit einem Etikett **A** und einem Etikett **B** ausgestattet.
- Etikett **A** kennzeichnet die **obere** Seite der Rampe (die Seite, die auf dem Hindernis liegt).
- Etikett **B** kennzeichnet die **untere** Seite der Rampe (die Seite, die auf dem Boden aufliegt).
- Die Rampe darf nur auf einem ebenen und stabilen Untergrund verwendet werden
- Kontrollieren Sie vor jeder Benutzung, dass die Rampe stabil liegt.
- Die Rampen können für einen bequemen Transport in Längsrichtung zusammengeklappt werden und sind mit einem bequemen Tragegriff ausgestattet. Mit der Gummilasche lassen sich beide Seiten zusammengeklappt fixieren.

Technische Daten

Rampentyp	S-90	S-150
Länge	90 cm	150 cm
Breite	77 cm	77 cm
Laufflächen Breite	73 cm	73 cm
Höhe Radabweiser	6 cm	6 cm
Max. Steigung / Höhendifferenz	12° / 20 cm	12° / 30 cm
Gewicht	8 kg	12,5 kg
Max. Belastung	300 kg	300 kg
Faltmasse cm (LxBxH)	90 x 40 x 10	150 x 40 x 10

Typenschild

Der Aufkleber befindet sich aussen am Radabweiser.



Wartung und Pflege

Normale Verschmutzungen an Metall- und Kunststoffteilen lassen sich mit handelsüblichen Reinigungsmitteln entfernen. Beachten Sie deren Produktinformation und verwenden Sie ausschliesslich handelsübliche Reinigungsmittel, die für die Reinigung bzw. Desinfektion geeignet sind (keine Lösungs- oder Scheuermittel).

Trotz der stabilen Bauweise und der Verwendung von widerstandsfähigen Materialien unterliegt das Produkt einem gewissen Verschleiss. Wir empfehlen Ihnen, das Produkt in regelmässigen Abständen von einem Fachmann kontrollieren zu lassen.



ACHTUNG! Die Gummilippe als Verbindung zwischen den zwei Rampenteilen ist ein Verschleissenteil und muss vor jedem Gebrauch auf Risse oder Sprödigkeit kontrolliert werden. Bei Defekt oder im Zweifelsfall empfehlen wir Ihnen, die Gummilippe auszutauschen.

Allgemeine Problembehebungen

Problembeschreibung	Mögliche Ursache	Problembehebung
Die Rampe klemmt beim Auseinander- oder Zusammenklappen.	Die seitlichen Radabweiser könnten verbogen sein.	Versuchen Sie die Radabweiser gerade zu biegen.
Die Rampe lässt sich schwer Auseinander- oder Zusammenklappen.	Schmutz an oder in den Scharnieren.	Reinigen und ölen Sie die Scharniere.

Entsorgung

Das Produkt darf nicht im Hausmüll entsorgt werden. Wenden Sie sich an Ihre lokale Recyclingstelle.

Garantie

Die Stamm Bau AG gewährt eine Garantie von zwei Jahren auf Schäden, die durch Produktions- oder Materialfehler verursacht wurden. Die Garantie erlischt bei einer nicht bestimmungsgemässen Reparatur, Wartung oder Verwendung des Produkts. Teile mit normalem Verschleiss sind von der Gewährleistung ausgenommen. Bei Produktänderungen ohne unsere schriftliche Zustimmung erlischt die CE-Kennzeichnung und unsere Produkthaftung. Bitte informieren Sie die Stamm Bau AG direkt, falls ein Produkt einen Garantiefall darstellt. Die Garantie umfasst keine Transportkosten und keinen Schadenersatz während der Reparatur sowie keinen Personenschaden. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Verletzungen oder andere Schäden, die auf die Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung zurückzuführen sind.